


Produktfaktablad TENA Men Nivå 1-3

Användningsområde

TENA Men Nivå 1-3 är läckagesäkra, bekväma och diskreta herrskydd med en design utformad efter den manliga anatomin. För mindre urinläckage. Ingår i TENA Men sortimentet med skydd i olika modeller och absorptionsnivåer.

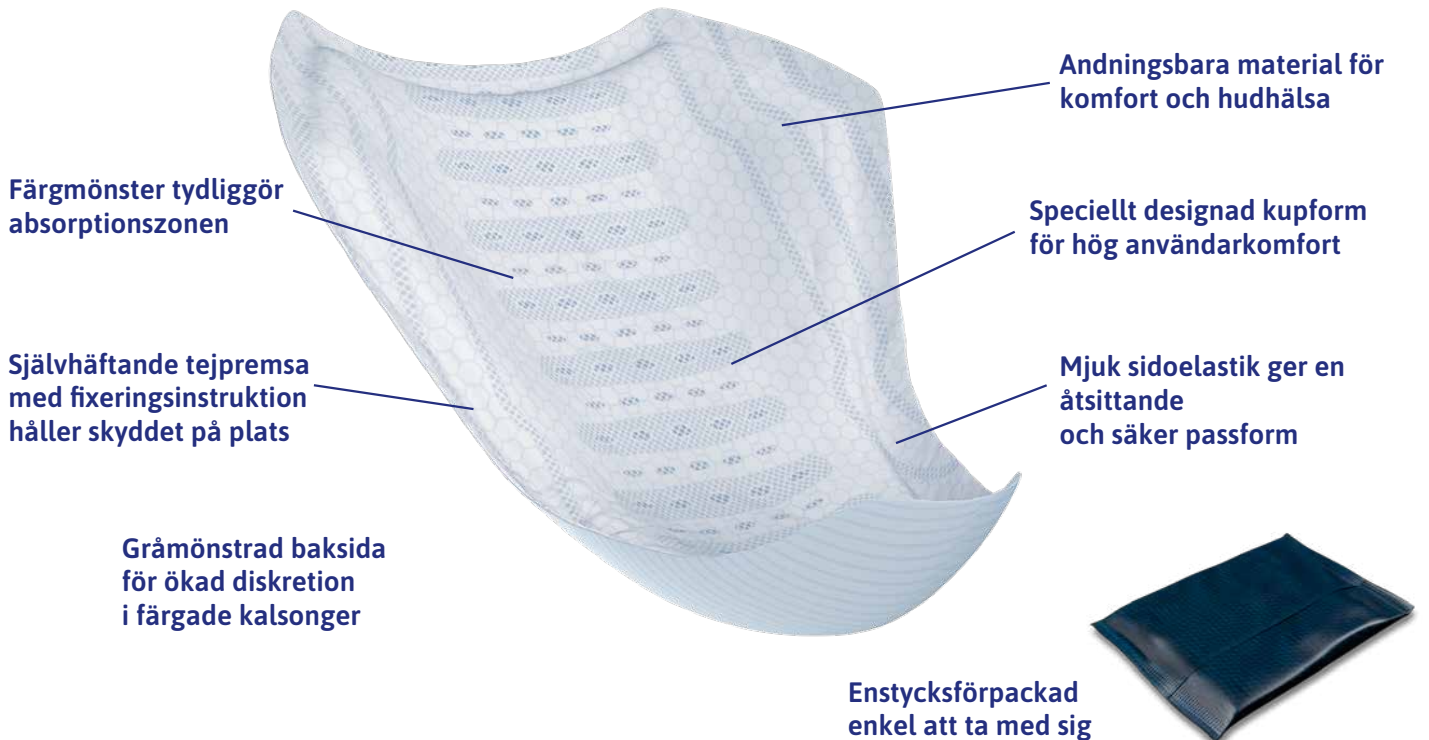

Produktegenskaper

TENA Men Nivå 1-3 har en absorberande kärna med superabsorbenter. Urinen absorberas snabbt, sprids och lagras i botten av skyddet, vilket ger en hög yttorrhet. Baksidesmaterialet förhindrar genomvättning.

TENA Men Nivå 1-3 är försedd med mjuk och stadig elastik i sidorna som ökar både läckagesäkerheten, kupformningen och bekvämligheten.

TENA Men Nivå 1-3 har Odour Control™ som hjälper till att förhindra oönskad lukt. Textilliknande andningsbara material runt hela produkten och andningsbart spärrskikt ger ökad komfort och bidrar till att minska risken för hudproblem.

TENA Men Nivå 1-3 fixeras med hjälp av tejp på produktens baksida i tätt åtsittande kalsonger. Fixeringstejpen håller skyddet säkert på plats utan att lämna häftrester på textilier. Tejpens skyddspapper är märkt med produkt-namn/storlek och illustrationer som visar vilken del av skyddet som är uppåt och hur det fixeras.



Produktfaktablad TENA Men Nivå 1-3



TENA Men


Uppsugningsnivå/storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Nivå 1	23	20	10	24	144	96 ml	287 ml	75 06 84
Nivå 2	27	23,6	17	20	120	167 ml	501 ml	75 08 74
Nivå 3	27	23,6	31	16	96	239 ml	717 ml	75 08 76



Säker absorptionszon som effektivt låser in läckage



Anpassad efter mannens kropp med bekväm kupform

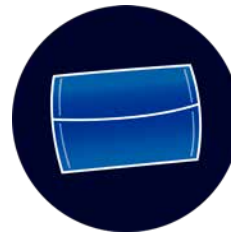

Enstycksförpackad



Skyddar mot läckage, lukt och fukt



Diskret med extra tunn design



Sitter på plats tack vare självhäftande remsa

Användarinstruktion



Ta ut skyddet ur enstycksförpackningen och vik upp det.

Dra bort skyddspappret på baksidan.

Placera skyddet över penis och pung och fäst i åsittande kalsong eller fixeringsbyxa.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

Produktfaktablad TENA Men Nivå 1-3

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven; Polypropylen (PP)
Funktion: Hålla huden torr, mjukhet

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester
Funktion: Släppa igenom urin snabbt och motverka att urin tränger tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter
Funktion: Absorbera och hålla kvar urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat
Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

BARRIÄRELASTIK

Syntetiskt gummi; Polyisopren
Funktion: Förhindra läckage, ge bra kupform och passform, samt god komfort

SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)
Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

För samtliga TENA Men gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand